



# Användarinstruktion för Diphoterine®

För behandling av stänk av kemikalier på hud eller i ögon\*.

## PÅBÖRJA SKÖLJNING INOM EN MINUT



Sköljning påbörjas  
inom 10s




Använd  
1 SIEW  
**50ml**

Sköljning påbörjas  
först efter 10s




Använd  
1 Flaska  
**500ml**

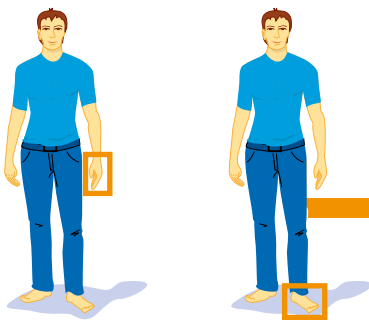

**3%** av  
kroppsytan



Använd  
1 MICRO  
**100ml**

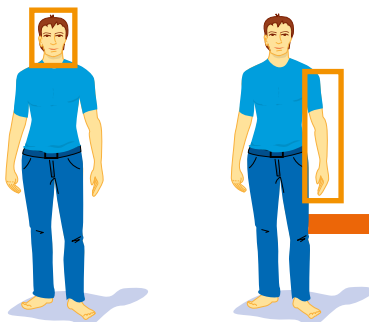

**9%** av  
kroppsytan



Använd  
1 MINI  
**200ml**



**>= 9%** av  
kroppsytan



Använd  
1 DAP  
**5L**

\* Begränsad effekt mot Fluorvätesyra eller dess derivat i ett surt medium. Hexafluorine® rekommenderas för detta ändamål.

# Användarinstruktion för Diphoterine®\*

Påbörja sköljning **inom en minut** efter det att olyckan inträffat, prioritera de **oskyddade kroppsytorna**.

**Avlägsna kläder och/eller kontaktlinser.**

Fortsätt omedelbart med behandlingen av de nu **blottlagda kroppsytorna**.

Ta ej på kläder igen som utsatts för stänk av kemikalien eller som blivit våta av sköljningen.

Kontakta läkare.

## GENERELLA INSTRUKTIONER

### Fördröj aldrig påbörjandet av behandlingen

För optimalt resultat, använd Diphoterine® som första behandlingsmetod.

Använd hela innehållet i behållaren.

Om Diphoterine® inte finns att tillgå initialt, använd vatten och skölj sedan med Diphoterine® så fort som möjligt.

Om behandlingen påbörjas **efter en minut**, förläng sköljningen av den utsatta ytan med Diphoterine® med 3 till 5 minuter gånger tiden som hunnit passera innan sköljningen påbörjades.

I fallet med en fördröjd påbörjad sköljning av stänk i ögat, så är det ej nödvändigt att fortsätta sköljningen längre än 15 minuter.

**Kontakta sedan läkare omedelbart**

Efter behandling av ögat, kan **Natriumklorid vätska** användas för att underlätta en snabbare återhämtning av ögat till dess fysiologiska normaltillstånd.

Om **munhålan** utsatts för stänk av kemikalien, skölj munnen med Diphoterine® och spotta sedan ut det.

Om **hörselgången** utsatts för stänk av kemikalien, skölj så fort som möjligt med Diphoterine® genom att spruta in 500ml i hörselgången och samtidigt luta huvudet åt ena sidan för att möjliggöra för vätskan att flöda ut ur örat.

*Som i samtliga fall med ensidig sköljning av ett öra med en rumstempererad vätska, så kan yrsel uppstå. Det är ej farligt och kommer att försvinna inom ett par minuter.*

| Behållare      | Rekommenderad behandlingstid |
|----------------|------------------------------|
| SIEW (50ml)    | 30 sekunder                  |
| Micro (100ml)  | 50 sekunder                  |
| Mini (200ml)   | 1 min 30 sekunder            |
| Flaska (500ml) | 3 minuter                    |
| DAP (5L)       | 5 minuter                    |



**PREVOR**

ANTICIPATE AND SAVE

Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management

\* Begränsad effekt mot Fluorvätesyra eller dess derivat i ett surt medium. Hexafluorine® rekommenderas för detta ändamål.