

MEDICAL CARE SPRAY

FÖRSTA HJÄLPEN VID TERMISKA BRÄNNSKADOR, ÖGON- OCH SÅRSKADOR

Medical Care Spray är en egenutvecklad Första Hjälpen spray som optimerar omhändertagandet från skadetillfälle till slutligt omhändertagande på sjukhus. Produkten är avsedd för behandling av termiska brännskador över hela kroppen liksom ögon- och sårskador.

UPPKOMSTEN AV TERMISKA BRÄNNSKADOR

En termisk brännskada uppstår på grund av att värme från heta föremål eller vätskor fortplantar sig genom hudlagren, och så länge denna energi kvarstår så kommer skadan att förvärras.

BEHANDLING AV BRÄNNSKADOR

Genom att spraya över det skadade området med en finfördelad spraydimma så absorberas värmen och skadans utbredning minskar och smärtan avtar. Ju mindre och fler droppar, desto bättre absorptionsförmåga. Vätskan bör ej vara för kall, det vill säga under 10 °C för risken är då att blodkärlen drar sig samman och kyleffekten uteblir. Temperaturen på vätskan bör ej heller vara för varm, det vill säga över 25 °C - då uteblir smärtlindringen.

BEHANDLING AV ÖGONSKADOR

I händelse av att partiklar (damm/smuts) kommer i ögonen är det också viktigt att så fort som möjligt spola bort partiklarna med en ögon-dusch, så att de ej skadar hornhinnan och ögat blir inflammerat.

PRODUKTEN

Medical Care Spray består av ett sprayaggregat som ger en mycket finfördelad spraydimma som effektivt kyler det skadade området, och vätskepåsar med steril isoton koksaltlösning (NaCl) 0,9%.

RIKTAD BEHANDLING

Med Medical Care Spray kan man enkelt rikta behandlingen till det skadade området. Genom att enbart kyla den utsatta kroppsdelen minimeras risken för hypotermi.

ÖPPEN BEHANDLING

Spraydimman medför en öppen behandling, till skillnad mot värmeabsorberande förband vilka ej bör användas vid större skador på grund av risken för hypotermi, liksom då kemikalier kan vara inblandade då det finns risk att kemikalierna stängs in.

EFTERBEHANDLING AV BRÄNNSKADOR FRÅN HETA KEMIKALIER

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier. Vid brännskador orsakade av heta kemikalier skall Diphoterine® eller Hexafluorine® användas först.



SNABBFAKTA

För behandling av termiska brännskador, ögon- och sårskador.

CE CE märkt medicinteknisk produkt

Följer standarden EN15154-3/4.

Samma behandling på olycksplatsen som på sjukhus.

Medger en öppen och riktad behandling som förebygger hypotermi.

Behandling kan ske i alla vinklar, och fortgå under förflyttning, till exempel under transport till sjukhus.

“DE FLESTA OLYCKOR
HÄNDER INTE, VI LÅTER
DEM HÄNDA...”



Produkten finns i olika utföranden för att passa just din arbetsmiljö: bärbar eller väggmonterad samt med eller utan uppvärmning. Se exempel på nästa sida. För mer info: www.medicalcare.se

MEDICAL CARE SPRAY

PRODUKTÖVERSIKT



MEDICAL CARE 1

Art. nr 0401

Axelremsväska i vävplast innehållande 1st spraymunstycke, 1L sköljvätska, slangklämma och en ögonkopp. Levereras med vägghållare. Behandlingstid ca 20min. Produkten på bilden är extrautrustad med en flaska Diphoterine (säljes separat)



MEDICAL CARE 2/6

Art. nr 9802/1206

Portabel Första-Hjälpen väska. Väggfäste medföljer. Innehåller 1st spraymunstycke, 2x1L sköljvätska, slangklämma och ögonkopp. Medical Care 2 innehåller även Första förband och sax. Behandlingstid ca 2x20min. Produkten på bilden är extrautrustad med en flaska Diphoterine för behandling av skador orsakade av stänk från kemikalier (säljes separat)



MEDICAL CARE 3

Art. nr 9503

Väggfast Första-Hjälpen skåp med dammskydd. Innehåller 1st spraymunstycke, 2x1L sköljvätska, slangklämma och ögonkopp. Behandlingstid ca 2x20min.



MEDICAL CARE 4

Art. nr 0204

Portabel Första Hjälpen väska i aluminium med inbyggt värmeelement för kalla inom- eller utomhusmiljöer. Väggfäste medföljer. Innehåller 1st spraymunstycke, 2x1L sköljvätska, slangklämma och ögonkopp. Behandlingstid ca 2x20min. Termostaten håller en temperatur på mellan 25-35 grader. Möjlig att ansluta till 12V uttag eller till 230V via medföljande transformator.



MEDICAL CARE SJUKVÅRDSPRAY

Art. nr 0950-1

Spraymunstycket säljs även separat till ambulanser och sjukhus i en steril förpackning och innehåller då spray, slang, insticksspets och slangklämma som passar ihop med de vätskepåsar som ambulanser och sjukhus redan använder.



MEDICAL CARE SPRAYBURK

Art. nr 0160

Sprayburken innehåller 200ml isoton koksaltlösning 9 mg/ml och är primärt avsedd för behandling av ögon- och sårskador, t.ex. för att skölja rent sår och avlägsna smuts i ögon. Behandling kan ske i alla vinklar. Väggfäste finns som tillbehör.

TILLBEHÖR & RESERVDELAR

Medical Care Vägghållare till 200ml Sprayburk	Vägghållare 1x200ml, svart Väggtafva 3x200ml, grön	Art.nr: 0171 Art.nr: 0170	Medical Care Spray utan slang	Utbytes-/Reservdel	Art.nr: 0950
Medical Care Laddtafva	Väggtafva för placering vid truck-laddningsstationer. Plats för handskar, glasögon, förkläde	Art.nr: 9655	Medical Care Vätska 2x1L med slang	Utbytes-/Reservdel	Art.nr: 0322
Medical Care Lock MC3	Reservdel till Medical Care 3 skåp	Art.nr: 9703	Medical Care Ögonkopp	Utbytes-/Reservdel	Art.nr: 0325
Medical Care Läderhölster till 200ml sprayburk	Läderhölster för Medical Care Sprayburk 1x200ml	Art.nr: 0365	Medical Care Kit	Utbyteskit med Spraymunstycke, 2xVätska, Ögonkopp	Art.nr: 0340



MCS framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga Första-Hjälpen produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen. Vi genomför också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa, samt på bästa sätt omhändertar skadade i händelse av olycka. www.medicalcare.se