

HEXAFLUORINE®

ENSIAPU KEMIALLISSA TAPATURMISSA FLUORIVETYHAPOLLA

Pysyviä vammoja syntyy usein vain sekuntien kuluessa. Hätäsuihkulle meno ja yritys pestä aggressiivisiä kemikaaleja vedellä pois voivat viedä liikaa aikaa. Sen lisäksi vesi pystyy vain rajoitetusti laimentamaan eikä sillä ole neutraloivia ominaisuuksia, mikä tekee jatkuvan huuhtelun pitkäksi aikaa tarpeelliseksi halutun vaikutuksen saavuttamiseen. Tämän ajan kuluessa kemikaalin hyökkäys jatkuu.


Välttämällä neutraloimisella ehdimme pysäyttää kemikaalin ennen kuin se aiheuttaa pysyviä vammoja. Voimme myös kohdella hätätilassa olevaa henkilöä turvallisemmin koska vaatteetkin neutraloidaan, samalla kun se helpottaa pintojen ja materiaalin puhdistusta.

TUPLAPELASTAJA

Hexafluorine® on ainutlaatuinen huuhteluneste ensiavun käyttöön, joka on suunniteltu käytettäväksi kosketuksessa fluorivetyhapon ja sen johdannain kanssa. Se toimii kaikkia happoja vastaan, mutta tekee myös myrkyllisen fluoridi-ionin vaarattomaksi, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja, jos sen annetaan päästä vartaloon, jossa se mm. sitoo kalsiumia. Hexafluorinen® hypertoni- sen ominaisuuden johdosta estetään myös haitallisen kemikaalin läpipääsyn ja auttaa vetämällä ulos läpäistyä kemikaalia kudoksesta.

FLUORIVETYHAPPO

Fluoridi-ioni & hapon läpäisykyky

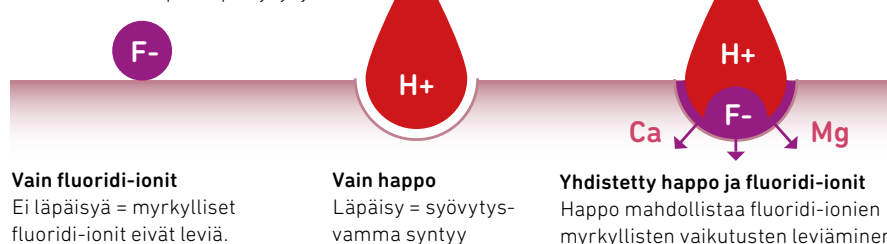

PIKAFAKTA

Kemiallisten palovammojen hoitoon, joita aiheutettiin fluorivetyhapolla.

CE CE-merkitty lääketieteellisen tekniikan tuote.

Arvostettu korvike silmä- ja hätäsuihkuun EN151543/4:n mukaan.

Tekee nopeasti syövyttävän hapon sekä myrkyllisen fluoridi-ionin vaarattomaksi.

Voi käyttää silmissä, iholla, suuontelossa sekä korvakäytävässä.

Kertakäyttöön.

Säilyy 2 vuotta.

”USEIMMAT TAPATURMAT
EIVÄT TAPAHDU, VAAN
ANNAMME NE TAPAHTUA...”



Tuote on saatavilla eri valmistusmuodoilla sopiakseen juuri sinun työympäristösi: kannettava tai seinälle asennettuna sekä lämmityksellä tai ilman. Katso esimerkkiä seuraavalla sivulla. Lisää tietoa: www.medicalcare.se

HEXAFLUORINE® TUOTELISTA



HEXAFLUORINE® PULLO / PUSSI

Tuote nro: 07-2-16 / 98-2-15

Hexafluorine® on saatavilla 500ml:n pulloissa tai pusseissa ja siihen kuuluvan letkunpuristimen ja silmäkupin. On tarkoitettu fluorivetyhapon ensiavun hoitoon ja neutralisoimaan kemikaaliroiskeet silmässä. Käytetään 60 sekunnin sisällä kemikaaliroiskeen saatuaan. Lääketieteelliseen hoitoon suosittelemme 500 ml:n pussin. Saatavilla myös kuuluvalla taskulla (yhdistetty vyö- tai olkatasku).



HEXAFLUORINE® HUUHTELUASEMA

Tuote nro: 11-2-14

Seinään kiinnitetty huuhteluasema sisältää 2 kappaletta 500 ml:n pulloa Hexafluorinea®. On tarkoitettu neutralisoimaan ja huuhtelemaan pois pienempiä kemikaaliroiskeita (varsinkin silmistä). Lisättävä Calcium Gluconate Gel, 40gr:n tuubilla (myydään erikseen).



HEXAFLUORINE® DAP

Tuote nro: 99-2-55

Hexafluorine® DAP 5L on itsestään pystyssä pysyvä, kannettava suihku. Se hyödyttää fluorivetyhapon isomman kemikaaliroiskeen neutralointia ja poishuuhtelemista koko vartalolla. Hoito on aloitettava 60 sekunnin kuluessa onnettomuuden sattuessaan.

KALSIUMGLUKONAATTI GEELI



KALSIUMGLUKONAATTI GEELI, TUUBI

Tuote nro: 10-3-50

Tuubi sisältää 40g kalsiumglukonaatti geeliä 2.5 %. Säilyy 3 vuotta valmistuspäivämäärästä alkaen. On tarkoitettu pienempien fluorivetyhapon aiheuttamiin vammoihin, kämmenen kokoiseen (noin 1 % kehon pinta-alasta). Vain ulkoiseen käyttöön, ei saa käyttää silmiin. Myydään erikseen, mutta voidaan täydennyksenä asentaa Hexafluorine® Huuhteluasemaan.



KALSIUMGLUKONAATTI GEELI, PURKKI

Tuote nro: 07-0-51

Purkki sisältää 500g kalsiumglukonaatti geeliä 2.5 %. Säilyy 3 vuotta valmistuspäivämäärästä alkaen. On tarkoitettu isompien fluorivetyhapon aiheuttamiin vammoihin, käsivarren kokoiseen (noin 9 % kehon pinta-alasta). Vain ulkoiseen käyttöön, ei saa käyttää silmiin. Myydään erikseen.

LISÄVARUSTEET & VARAOSAT

Hexafluorine DAP 5L, vaihto käytön jälkeen	Automaattinen kannettava suihku, pelti, säilyy 2 vuotta, huuhtelusuihku koko vartaloa varten	Tuote nro: 99-2-56	Suojakaappi DAP 5L, lämmityksellä	Muovinen suojakaappi, lämmityksellä	Tuote nro: 03-0-60V
Hexafluorine DAP 5L, vaihto viimeisen käyttöpäivän jälkeen	Automaattinen kannettava suihku, pelti, säilyy 2 vuotta, huuhtelusuihku koko vartaloa varten	Tuote nro: 99-2-57	Suojakaappi DAP 5L, lämmityksellä. EX-luokiteltu.	EX-luokiteltu muovinen suojakaappi, lämmityksellä	Tuote nro: 03-0-60VEX
Suojakaappi DAP 5L	Muovinen suojakaappi, sopii Diphoteriinen ja Hexafluorineen	Tuote nro: 03-0-60	Vyötasku 500ml:n Hexafluorineen	Vyö-/olkatasku kankaasta Hexafluorine 500ml:n pussiin tai 500ml:n pulloon	Tuote nro: 07-0-16

Uusi DAP sisältää suojakaapin, sakset, käsineet ja kyltin silmämerkillä. Joka DAP:lla on ominainen numero tunnistena. DAP:n vaihto sisältää sakset ja käsineet.



Medical Care System tuottaa ja jakaa korkealaatuista ja helposti saatavia ensiapu-tuotteita kemiallisten ja termisten palovammojen nopeaa ja tehokasta hoitoa silmiin sekä koko vartalolle. Järjestämme myös asiakkaille erityisesti sovellettuja riskianalyyskejä ja koulutuksia kemiallisista ja termisistä vaaroista, sekä miten niitä vältetään. Opetamme myös parhaan hoitotavan onnettomuuden sattuessaan. www.medicalcare.se