



Anvendelse af Hexafluorine®

Ved kontaminatione med flussyre og dens derivater i surt miljø*

BEHANDLING I FØRSTE MINUT



Til øjeskylning
(inden 10 sekunder)



Brug
1 Flaske
500ml



Til kropsskylning
(inden 1 minut)



Brug
1 DAP
5L

Under alle omstændigheder bør der konsulteres en læge efter skylningen.

Afhængig af virksomhedens medicinske protokol, skal der lokalt appliceres et specifikt antidot af typen calciumgluconat, lige efter skylningen.

I tilfælde af forsinket skylning er anvendelsen af et antidot berettiget pga. den systemiske effekt som er involveret i denne slags situationer.

* Begrænset effekt ved alkaliske kemikalier. Diphoterine® er bedre egnet til dette brug.

Anvendelse af Hexafluorine[®] *

Begynd med at skylle **inden for det første minut** efter forureningen er sket, og begynd med de dele, som **ikke er afdækket**.

Fjern tøj og/eller kontaktlinser.

Skyl nu de områder som **er afdækket af tøj** så hurtigt som muligt.

Tag aldrig tøj på, som er forurennet med kemikalier eller væskerester.

Konsultér en specialist.

GENERELLE INSTRUKTIONER

Skyl altid umiddelbart efter forureningen.

For optimal effekt brug Hexafluorine[®] som **den primære behandling**.

Brug altid hele beholderens indhold.

Hvis ikke der er Hexafluorine[®] tilgængeligt, brug vand og derefter skyl med Hexafluorine[®] så snart som muligt.

Ved kontaktid på mere end 1 minut, forlæng skylletiden med Hexafluorine[®] op til 3 til 5 gange af kontaktiden.

I tilfælde af en forlænget kontaktid i øjet er det ikke nødvendigt at skylle i mere end 15 minutter.

Derefter skal der straks søges lægehjælp

Efter øjeskyllingen anbefals brugt af **Natriumklorid 0,9%** for at fremme en hurtigere tilbagevenden til en fysiologisk tilstand.

Hvis **mundslimhinden** er påvirket, skyl munden med Hexafluorine[®] og spyt det ud derefter.

Hvis **øregangen** er påvirket, skyl den med Hexafluorine[®] så hurtigt som muligt ved at indføre 500ml inde i øregangen, mens hovedet læner til den ene side, for at tillade at væsken kan strømme ud af øret.

I ethvert tilfælde af ensidig skylning af det ene øre med en væske ved stuetemperatur, kan der forekomme en svimmel fornemmelse uden alvorlige konsekvenser. Det stopper igen efter et par minutter.

Beholder	Skyllningstid
Flaske (500ml)	3 minutter
DAP (5L)	5 minutter



PREVOR

ANTICIPATE AND SAVE

Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management

* Begrænset effekt ved alkaliske kemikalier. Diphoterine[®] er bedre egnet til dette brug.