

Dokumentets namn:

Instruktion_Öppnande av Flaska 500ml

Sida:
1 (1)

Datum:
2015-05-05

Dokument version:
1

Detta dokument ersätter tidigare instruktioner i ärendet.



www.medicalcare.se

Instruktion för öppnande av Flaska 500ml. (Gäller både Diphoterine och Hexafluorine)

För att kunna agera i en nödsituation är det viktigt att veta hur våra Första Hjälpen produkter fungerar och används. I nedanstående instruktion beskrivs hur man enklast öppnar Flaska 500ml (gäller både Diphoterine och Hexafluorine).

Öppna genom att vrida medsols eller motsols

Korken öppnas genom att vrida av den antingen medsols eller motsols. Då knäcks 2st små platsäkringar som hjälper till att hålla locket på plats samtidigt som de visar att flaskan är öppen. Se bild 1 nedan.

Observera att flaskhalsen utgör en del av "korken"

Det är viktigt att notera att flaskhalsen går upp med en krans som ansluter till själva locket på flaskan. För att öppna locket skall man vara noga med att greppa endast den del som utgör själva "locket" Se bild 2 nedan.

Det är viktigt att inte ta ett för stort grepp runt hela toppen på flaskan. Om så är fallet så blir effekten att man försöker man vrida runt även den fasta flaskhalsen och ingenting händer. Se bild 3 nedan.



Bild 1. Plastsäkringar som bryts vid öppnande.



Bild 2. Korrekt teknik vid öppnande.



Bild 3. Felaktig teknik vid öppnande.