

Dokumentets namn:

Instruktion_Användning av DAP 5L

Sida:
1 (1)

Datum:
2015-06-16

Dokument version:
1

Detta dokument ersätter tidigare instruktioner i ärendet.



www.medicalcare.se

Instruktion för användning av DAP 5L. (Gäller både Diphoterine och Hexafluorine)

För att kunna agera i en nödsituation är det viktigt att veta hur våra Första Hjälpen produkter fungerar och används. I nedanstående instruktion beskrivs hur man hanterar vår portabla nöddusch, kallad DAP 5L. (gäller både Diphoterine och Hexafluorine). OBS: En förutsättning för att kunna använda DAP är att den röda transportsäkring är borttagen, se bild 1 nedan.

Aktivera DAP genom att dra ut sprinten och slå ner handtaget

Inuti DAP finns en patron med koldioxid som måste aktiveras för att trycksätta behållaren och möjliggöra för Första Hjälpen sköljvätskan att sprutas ut. Det görs genom att dra ut den gröna säkerhets-sprinten och sedan slå ner det svarta handtaget. Se bild 2 och 3 nedan.

Använd spraymunstycket på slangen för att fördela vätskan

När DAP är aktiverad så använder man spraymunstycket längst ut på slangen för att spruta ut sköljvätskan. Det svarta handtaget som sitter på själva behållaren kan med fördel användas som ett bärhandtag. Spoltiden är ca 5min. Se bild 4 nedan.

Följ anvisningarna i aktuell Sköljinstruktion

Påbörja sköljning inom en minut efter det att olyckan inträffat, prioritera de oskyddade kroppsytorna. Avlägsna sedan kläder och/eller kontaktlinser. Fortsätt omedelbart med behandlingen av de nu blottlagda kroppsytorna. Se separat Sköljinstruktion för detaljer. (Bild 5).

Sköljinstruktioner finns att ladda ner från vår hemsida www.medicalcare.se/dokumentation.



Bild 1. Säkerställ att den röda transportsäkring **ALLTID** är borttagen.



Bild 2. Dra ut den gröna säkerhets-sprinten.



Bild 3. Slå ner Handtaget.



Bild 4. Spruta med spraymunstycket.

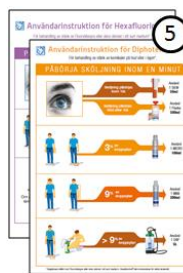


Bild 5. Skölj enligt anvisningarna.