

Dokumentets namn:

## Instruktion\_Öppnande av Flaska 500ml Finska

Sida:  
1 (1)

Datum:  
2015-06-17

Dokument version:  
1

Detta dokument ersätter tidigare instruktioner i ärendet.



[www.medicalcare.se](http://www.medicalcare.se)

# Käyttöohje Pullo 500ml avaamisen. (Koskee Diphoterinea sekä Hexafluorinea)

Hätätapauksessa on tärkeää tietää miten ensiaputuotteemme toimivat ja miten niitä käytetään. Alla selvitetään miten parhaalla tavalla aukaistaan 500 ml pullo, (koskee Diphoterinea sekä Hexafluorinea).

### Aukaise kiertämällä myötä- tai vastapäivään.

Avaa pullon korkki kiertämällä joko myötä- tai vastapäivään. Kaksi pientä muovivarmistinta irtoaa jotka pitävät korkkia paikallaan. Pullo on avaamaton kun muovivarmistukset ovat ehjiä. Katso kuvaa 1.

### Huomioi että pullonkaula on osa korkkia.

Huomaa, että pullonkaula jatkuu ylöspäin liittyen pullonkorkin omaan kehään. Kun avaat pullonkorkin, on tärkeää, että otat ainoastaan kiinni korkinosasta. Katso kuvaa 2.

On tärkeää ettet ota liian suurta otetta pullonkaulasta. Jos näin käy ja yrität kiertää korkkia, mitään ei tapahdu koska pidät kaulasta kiinni etkä korkista. Tämän vuoksi et saa korkkia auki. Katso kuvaa 3.



**Kuva 1.**  
Muovivarmistukset irtoavat kun avaat korkin.



**Kuva 2.**  
Oikea tapa avata pullonkorkki.



**Kuva 3.**  
Väärä tapa avata pullonkorkki.