

Dokumentets namn:

Instruktion_Användning av DAP 5L, Finsk

Sida:
1 (1)

Datum:
2015-06-16

Dokument version:
1

Detta dokument ersätter tidigare instruktioner i ärendet.



www.medicalcare.se

DAP 5L käyttöohjeet (Koskee Diphoterinea sekä Hexafluorinea)

Hätätapauksessa on tärkeää tietää miten ensiaputuotteemme toimivat ja miten niitä käytetään. Alla selvitetään miten käsitellään meidän kannettavaa hätäsuihkua, kutsuttu DAP 5L, (koskee Diphoterinea sekä Hexafluorinea). HUOM! Edellytys sille, että voi käyttää DAP 5L, on että siitä poistetaan punainen kuljetuslukko. (Katso kuvaa 1.)

Kun otat DAP käyttöön, vedä vihreä tappi pois ja lyö musta kahva alaspäin.

DAPin sisällä on hiilidioksidipatruuna jonka täytyy aktivoitua. Säiliöön tulee painetta joka mahdollistaa Ensiapu huuhtelunesteen suihkuttamista. Tämä tapahtuu kun vedät vihreän tapin pois ja lyöt mustaa kahvaa alaspäin. (Katso kuvat 2 ja 3.)

Käytä letkun suutinta jotta pystyt levittämään huuhtelunesteen.

Kun DAP on aktivoitu. Käytä letkun suutinta, jotta pystyt levittämään huuhtelunesteen. Säiliön mustaa kahvaa voi myös käyttää kantokahvana. Huuhtelu-aika on noin 5 min. (Katso kuvaa 4.)

Seuraa huuhtelun käyttöohjeita.


Aloita huuhtelu minuutin sisällä onnettomuudesta. Huuhtele ensin paljaalle iholle. Poista sitten vaatteet ja/tai piilolinssit. Riisuutumisen jälkeen jatka välittömästi huuhtelua paljaalle iholle. Seuraa erikseen kirjallista käyttöohjetta. (Katso kuvaa 5.) Kaikki käyttöohjeet löydät myös meidän kotisivulta. <http://www.medicalcare.se/dokumentaatio/>



Kuva 1.
Varmista AINA että punainen kuljetuslukko on poistettu.




Kuva 2.
Poista vihreä tappi vetämällä.

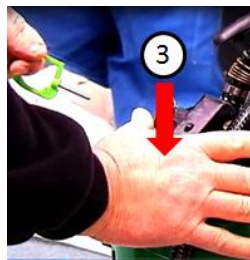

Kuva 3.
Lyö musta kahva alaspäin.



Kuva 4.
Levitä neste letkun suuttimella.

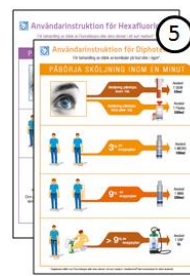

Kuva 5.
Seuraa huuhtelun käyttöohjeita.