

# S-CUT QE

För att snabbt avlägsna kläder vid kemisk olycka

Skärverktyget S-CUT är speciellt utvecklat för dig som har behov av att snabbt och säkert kunna skära i olika material såsom textilier, läder, rep mm.

Säkerhetsprincipen för S-CUT QE bygger på den patenterade teknik som under flera år använts på motsvarande verktyg avsedda för akutmottagningar, ambulanser, räddningstjänster och försvar i stora delar av världen.

I många situationer ersätter S-CUT QE helt saxar, knivar och andra skärande verktyg.



## Fakta S-CUT QE

**Produktnamn:** Skärkniv S-CUT QE

**Art.nr:** 15-001

**Vikt:** 0,062kg

**Längd:** 180mm


**Material:** Glasfiberarmerad plast

**Rengöring:** Tvål och vatten

S-CUT QE levereras färdig för användning och passar dig som inte använder skärverktyget dagligen eftersom skärbladet ej är utbytbart. Dock kan bladet roteras 5gr för en ny snittyta efter varje användning. Skärbladet är av samma typ som de dyrare modellerna i aluminium, men skaftet är gjort av slitstark glasfiberarmerad plast vilket bidrar till den låga kostnaden.

## Enkel att använda

1. S-CUT är färdig att använda.
2. Placera materialet du skall skära mellan mothållet och skaftet och dra S-CUT mot dig för att skära.
3. Vid tjocka material, undvik att rycka. Vicka istället på verktyget i sidled samtidigt som du fortsätter att dra.
4. Skärbladet står stilla då man skär och när skärytan slitits så att den behöver bytas vrids en ny skäryta fram genom att bladet roteras manuellt. Fatta tag i centrumskruven och vrid den motsols till det hörs ett knäpp, eller tills du känner att du passerar en klack. När bladet roterats och slitits varvet runt är verktyget förbrukat.

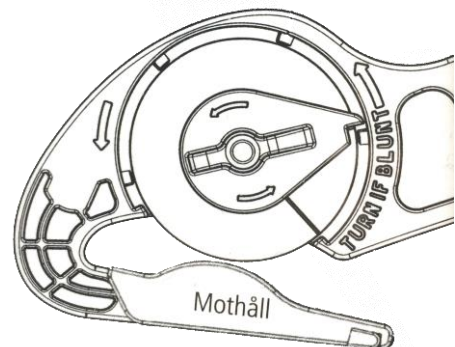

**OBS! Skärbladet är mycket vasst!**