

Dokumentets namn:

Ohje_500ml pussin asennus

Sida:
1 (1)

Datum:
2016-01-31

Dokument version:
1

Detta dokument ersätter tidigare instruktioner i ärendet.




www.medicalcare.se


Diphoterine/Hexafluorine 500ml pussin asennus.

Käyttöohjeet

Tämä ohje koskee Diphoterine tai Hexafluorine 500ml pussin kokoamista. Tässä ohjeessa mainitut osat ovat sisältäviä komponentteja. Asiakas täytyy koota ne ennen käyttöä.

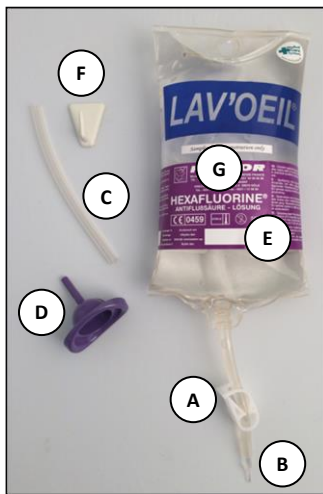

Kuva 1: Kuuluvat osat

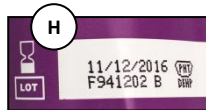

- A. Letkunpuristin
- B. Tappi
- C. Jatkoletku
- D. Silmäkuppi
- E. Alue johon kirjoitetaan viimeinen käyttöpäivä (jos on eri kun parasta ennen päivämäärä)
- F. Ripustuskoukku
- G. Nesteen merkki (Diphoterine/Hexafluorine)
- H. LOT nro ja parasta ennen päivämäärä (pussin takaosassa)



Kuva 2: Valmiiksi asennettu pussi

Asennusohjeet

1. Pujota letkunpuristimen (A) pussin letkuun. Purista yhteen niin että se estää nesteen valumista.
2. Katkaise ja poista tappi (B).
3. Pujota jatkoletku (C) pussin letkuun ja kiinnitä silmäkuppi jatkoletkuun. (D)
4. Tarkista että se toimii vapauttamalla letkunpuristinta. Nesteen pitää valua vaivatta.
5. Kirjaa asennuksen päivämäärä ja viimeinen käyttöpäivä (6 kuukauden sisällä) pussin etuosaan (E)
6. Ripusta nestepussi koukkuun. (F)

Parasta ennen päivämäärä

Toimittaessaan pussissa on tappi jonka täytyy katkaista ennen käyttöä. Kun tappi on ehjä, parasta ennen päivämäärä on voimassa, pakkauksen takaosassa (H). Kun tappi on poistettu ja asennus suoritettu, pakkaus säilyy 6 kuukautta asennuspäivästä laskien, ellei parasta ennen päivämäärä mene umpeen ennen sitä. Tämän päivämäärän voi kirjoittaa pussin etuosassa olevaan ruutuun. (E)

Tärkeää!

Tappi on poistettava ENNEN kuin jatkoletku ja silmäkuppi laitetaan paikoilleen. Muuten on suuri riski että tappi tukkii silmäkupin ja vaikuttaa nesteen valumiseen.

On myös pantu merkille että seuraava voi aiheuttaa, harvinaisissa tapauksissa, toimintahäiriön. Kun letkunpuristin on ollut paikoillaan kauan, letku voi vieläkin olla puristuksessa kun letkunpuristin avataan. Ja estää nesteen valumasta. Kunnes tämä (mahdollinen) ongelma on ratkaistu, suosittelemme että aukaisette letkunpuristimen vähintään kerran kuukaudessa ja siirräte letkunpuristimen paikkaa.