

Dokumentets namn:

Instruktion_montering av påse 500ml

Sida:
1 (1)

Datum:
2016-01-27

Dokument version:
1

Detta dokument ersätter tidigare instruktioner i ärendet.



www.medicalcare.se

Montering av Diphoterine/Hexafluorine Påse 500ml.

Tillämpningsområde

Denna instruktion avser montering av Diphoterine eller Hexafluorine Påse 500ml. De i instruktionen ingående delarna medföljer som komponenter, och behöver monteras ihop av kunden innan användning.

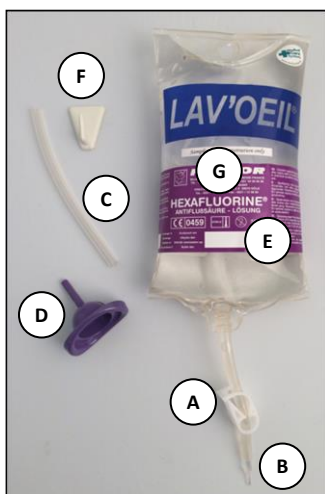


Bild 1: Ingående delar

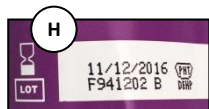


Bild 2: Färdigmonterad påse

- A. Slangklämma
- B. Brytstift
- C. Förlängningsslang
- D. Ögonkopp
- E. Fält för att ange sista förbrukningsdag (om annat än Bäst-Före datum)
- F. Upphängningskrok
- G. Typ av vätska (Diphoterine/Hexafluorine)
- H. LOT nr och Bäst-Före datum (på baksidan av påsen)

Monteringsanvisning

1. Trä på slangklämman (A) på påsens slang. Kläm ihop den för att förhindra att vätskan rinner ut.
2. Bryt och avlägsna brytstiftet (B).
3. Trä på förlängningsslangen (C) på påsens slang och tryck sedan fast ögonkoppen (D)
4. Kontrollera funktion genom att släppa på slangklämman. Vätskan skall då flöda ut utan svårighet.
5. Notera monteringsdatum och sista förbrukningsdag (inom 6 mån) på påsens framsida (E)
6. Häng upp vätskepåsen på medföljande krok (F)

Bäst-före datum

Påsen har vid leverans ett brytstift som måste brytas innan användning kan ske. När stiftet är obrutet gäller angivet Bäst-Före datum på förpackningens baksida (H). När stiftet bryts i samband med montering så gäller 6 månaders hållbarhet från monteringsdatum såvida inte Bäst-Före datum inträffar innan dess. Detta datum kan med fördel skrivas in i avsedd ruta på framsidan av påsen (E)

Viktigt!

Brytstiftet skall brytas och tas bort INNAN förlängningsslangen med ögonkoppen sätts på. Annars finns risk att det lösa brytstiftet täpper till ögonkoppen så att flödet påverkas.

Följande har också noterats och kan, i sällsynta fall, skapa en felfunktion. När slangklämman har suttit monterad på slangen en längre tid kan slangen, när man öppnar klämman, fortfarande vara sammanpressad och därmed medföra att ingen vätska kommer fram. Tills detta (potentiella) problem är löst rekommenderas att minst 1 gång per månad öppna och flytta slangklämman längs slangen.