

Användarinstruktion och Aptering Medical Care Spray

Version 1: 2022-03-08



Ögon-, bränn- och sårskadebehandling

Första Hjälp vid skadliga ämnen i ögon och på hud, vid
brännskador och rengöring av sår

Samma behandlingsmetod akut och under transport – som på sjukhus

Användarinstruktion Medical Care Spray

OBS! Medical Care Systems vätskepåsar, liksom Medical Care Spray är ENGÅNGSPRODUKTER.

Ett använt spraymunstycke skall bytas ut, liksom en apterad sköljvätska.

Vid stänk av kemikalier så rekommenderas DIPHOTERINE® lösning




Aptering



Aptera vätskan genom att trycka ihop adaptern, när den röda delen skjuts in i den gröna så trycks "spiken" igenom membranet på påsen. Koksaltlösningen når spraymunstycket genom pumpning.



Ögonskada

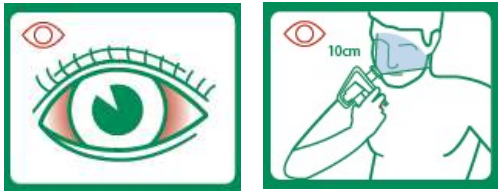

Påbörja behandling så snabbt som möjligt, spraya på ca 10cm avstånd från ögat. Sköljning kan fortgå under transport till sjukhus.



Brännskada Ögonskada



Avlägsna eventuella kläder

Aptera vätskan genom att trycka ihop adaptern, när den röda delen skjuts in i den gröna så trycks "spiken" igenom membranet på påsen. Koksaltlösningen når spraymunstycket genom pumpning.

Sköljning kan fortgå under transport till sjukhus.

Om smärtan återkommer fortsätt spraya.



Sårskada



Aptera vätskan genom att trycka ihop adaptern, när den röda delen skjuts in i den gröna så trycks "spiken" igenom membranet på påsen. Koksaltlösningen når spraymunstycket genom pumpning.

Sköljning kan fortgå under transport till sjukhus.

Avlägsna eventuella kläder spola rent såret även under hudflikar, som lyfts med pincett.