

DIPHOTERINE®

FÖRSTA HJÄLPEN VID KEMISKA OLYCKOR

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår. Att ta sig till en nöddusch och försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten har en begränsad förmåga att oskadliggöra kemikalier, vatten kan endast späda ut, vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning under en lång tid för att nå önskad effekt. Under denna tid pågår angreppet av kemikalien.

Med en omedelbar oskadliggörande effekt så hinner vi stoppa kemikalien innan den orsakar en bestående skada. Vi får också en säkrare hantering av den nödställda då även kemikalier i kläder oskadliggörs, samtidigt som det förenklar den efterföljande saneringen av ytor och materiel.



UNIK SPOLVÄTSKA

Diphoterine® är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk, som på ett snabbt och effektivt sätt oskadliggör både syror och baser såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra och natriumhydroxid (lut).



Diphoterine® är även verksam mot lösningsmedel och oxidanter och har testats effektivt mot över 1.500st kemikalier.

Diphoterine® består av en skräddarsydd molekyl som effektivt attraherar och oskadliggör kemikalien. Tack vare dess amfoteriska* och hypertona* egenskaper så är den säker att använda mot alla kemikalier samtidigt som den förhindrar penetration av den skadliga kemikalien och hjälper till att dra ut redan penetrerad kemikalie från vävnaden. På senare år har flera oberoende medicinska studier visat att de aktiva egenskaperna hos Diphoterine® gör att den har en mycket tydlig effekt upp till 24 timmar efter olyckan inträffade. Vid fall av fördröjd sköljning skall man skölja i 15 minuter med Diphoterine® för att säkerställa att all penetrerad kemikalie har dragits ut och oskadliggjorts.

RIKTAD BEHANDLING

Diphoterine® finns i flera utföranden och kan användas över hela kroppen; på huden, i ögonen, i munhålan och i hörselgången. Det är en CE märkt medicinteknisk produkt som uppfyller kraven som ersättare till ögon- och nöddusch enligt EN15154-3/4 och dess positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i Arbetsmiljöverkets rapport 2010:6.



SNABBFAKTA

För behandling vid kemiska olyckor.

CE CE märkt medicinteknisk produkt.

Diphoterine® uppfyller kraven i svensk och europeisk standard EN15154-3/4 för att ersätta ögon- och nödduschar.

Effektiv mot över 1.500st kemikalier.

Lika effektiv mot syror som mot baser.

Kan användas i ögonen, på huden, i munhålan och i hörselgången.

För engångsbruk.

Hållbarhet 2 år.

Tel: 0157-131 31
www.medicalcare.se

"DE FLESTA OLYCKOR
HÄNDER INTE, VI LÅTER
DEM HÄNDA..."

* Amfoterisk: Diphoterine kan binda upp både baser och syror.

* Hyperton: Diphoterine drar till sig vätska ut ur den mänskliga vävnaden.

DIPHOTERINE® Solution

DAP Bärbar nöddusch



Diphoterine® DAP 5L är en bärbar nöddusch som är avsedd för att oskadliggöra och skölja bort ett större kemikaliestänk över hela kroppen. Sköljning skall påbörjas inom 60 sekunder efter kemikaliestänk för att minimera skador. Placera därför Diphoterine® DAP i närheten av riskområdet. Uppfyller kraven på EN 15154 3/4
Kan kompletteras med aluminiumskåp med eller utan värme.
Hållbarhet 2 år.

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
99-2-75	Ny Portabel Nöddusch	1x5 L översköljningsdusch inkl skyddsskåp, handskar, s-cut	
99-2-77	Utbyte Portabel Nöddusch	1x5 L översköljningsdusch inkl handskar, s-cut	
10-0-60	Skyddsskåp i original	Skyddsskåp i plast	
19-0-01	Skyddsskåp aluminium	Insidan fodrad med skumgummi	
19-0-01V	Skyddsskåp i aluminium med värme	Insidan fodrad med skumgummi samt värmeelement	

Sköljstation för ögon och hud



Ögon- och nödduschstation. Diphoterine mot kemikalier.
En portabel, damm-, fukt- och smuttsäker sköljstation för ögon och hud mot kemikalier. Diphoterine oskadliggör syror, baser (alkali), oxidanter, reducerare, kelaterare och lösningsmedel. Innehåller 2st Diphoterine 500ml flaskor och 2st Diphoterine Mini (200ml sprayflaskor). Inklusive vägghållare. Uppfyller kraven enligt EN 15154-3/4. Hållbarhet 2 år. För kalla utrymmen finns skåpet med värmeelement

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
21-2-27M	Sköljstation MCS	Skåp i plast, 2x500 ml Flaska, 2x200 ml Mini, väggfäste	
22-2-27V	Värme Diphoterine® Sköljstation	Aluminiumskåp med värmeelement , 2x500 ml Flaska, 2x200 ml Mini, väggfäste	



Den väggfasta Diphoterine® Sköljstation innehållande 2x500ml flaska Diphoterine® samt 1 eller 2 st 200ml Diphoterine® Mini. Innehållet är anpassat för att oskadliggöra och skölja bort mindre kemikaliestänk från hela kroppen, särskilt från ansiktet och ögonen. Sköljning skall påbörjas inom 60 sekunder efter kemikaliestänk för att minimera skador. Placera därför sköljstationen i närheten av riskområdet. För kalla utrymmen finns skåpet med värmeelement. Finns även med hållare och 700 g Trivorex®. Uppfyller kraven för EN 15154 3/4
Hållbarhet 2 år.

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
11-2-27	Sköljstation	Skåp i EPP, 2x500 ml Flaska, 1x200 ml Mini	
11-2-27-2	Sköljstation Plus	Skåp i EPP, 2x500 ml Flaska, 2x200 ml Mini	
11-2-27V	Sköljstation Värme	Skåp i EPP med värmeelement, 2x500 ml Flaska, 1x200 ml Mini	
11-2-27 TXP	Sköljstation med Trivorex®	Skåp i EPP, 2x500 ml Flaska, 1x200 ml Mini, hållare samt 700 g Trivorex®	

Medical Care Laddplatsstation DIPHOTERINE®



En damm-, fukt- och smuttsäker laddplatsstation som oskadliggör den syra som batterier innehåller. Innehåller 2 st 500 ml Diphoterine® flaskor, 1 par skyddsglasögon och 1 låda med kemskyddshandskar. Inklusive vägghållare. Hållbarhet på Diphoterine® 2 år.
Uppfyller kraven enligt EN 15154-3/4. För kalla utrymmen finns skåpet med värmeelement.

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
21-2-28M	Laddplatsstation Diphoterine®	2x500 ml Flaska Diphoterine®, skyddsglasögon samt handskar TouchNTuff	
22-2-28V	Värme Laddplatsstation Diphoterine®	2x500 ml Flaska Diphoterine®, 1 Diphoterine® Mini 200 ml.	

DIPHOTERINE® för ögon



Diphoterine® SIEW 50ml är en bärbar ögonväska som är avsedd för att påbörja omedelbar Första Hjälpen-behandling och oskadliggörande av kemikalier i ögat inom 10 sekunder efter ett kemikaliestänk.
Kan kombineras med tillhörande läderhölster med clips för montering t.ex. i bältet.
Hållbarhet 2 år

Art nr	Beskrivning	Innehåll	
99-2-01	Diphoterine® SIEW 50ml	50 ml Diphoterine® för sköljning i ett öga	
07-0-01	Läderhölster med clips		

DIPHOTERINE® Solution



Diphoterine® Flaska 500 ml är avsedd för att påbörja Första Hjälpens behandling och oskadliggörande av kemikalier i ögat. Sköljning skall påbörjas inom 60 sekunder efter kemikaliestänk för att minimera skador. Placera därför flaskorna i närheten av riskområdet. Kan kompletteras med tillhörande tygväska eller clips för upphängning på ex vägg
Hållbarhet 2 år

Art nr	Beskrivning	Innehåll
07-2-26	Diphoterine® Flaska 500 ml	500 ml Diphoterine® för sköljning i öga
07-0-26	Midjeväska till Flaska 500 ml	Midje/axelremsväska för en flaska 500ml
15-0-16/26	Clips för väggmontage	

DIPHOTERINE® för huden



Diphoterine® Mini (200ml) är en sprayflaska avsedd för att påbörja Första Hjälpens-behandling och oskadliggörande för en kroppsdels motsvarande bålen. Sköljning skall påbörjas inom 60 sekunder efter kemikaliestänk för att minimera skador. Placera därför sprayflaskorna i närheten av riskområdet. Kan kompletteras med tillhörande läderhölster med clips för montering t.ex. i bältet eller en vägghållare för upphängning på ex vägg
Hållbarhet 2 år

Art nr	Beskrivning	Innehåll
99-2-03	Diphoterine® 200 ml Mini	200 ml Diphoterine® för sköljning på huden
01-0-03	Läderhölster med clips	
21-0-200	Vägghållare	



Diphoterine® Micro (100ml) är en sprayflaska avsedd för att påbörja Första Hjälpens-behandling och oskadliggörande för en mindre kroppsdels (t.ex. hand eller fot). Sköljning skall påbörjas inom 60 sekunder efter kemikaliestänk för att minimera skador. Placera därför sprayflaskorna i närheten av riskområdet. Kan kompletteras med tillhörande läderhölster med clips för montering t.ex. i bältet eller en vägghållare för upphängning på ex vägg
Hållbarhet 2 år

Art nr	Beskrivning	Innehåll
99-2-02	Diphoterine® 100 ml Mini	100 ml Diphoterine® för sköljning på huden
01-0-02	Läderhölster med clips	
21-0-100	Vägghållare	

Tillbehör till DIPHOTERINE® produkter

19-0-01
19-0-01V



10-0-60



22-2-27V / 17-0-01V



22-2-28V



11-2-27TXP



15-0-700

07-0-01



01-0-03



01-0-02



21-0-100



21-0-200

07-0-26



15-001



15-002



15-0-16/26

