

## Instruktion Åbning af flaske 500ml



**Hvordan man åbner en Flaske 500ml.**  
(gælder både for Diphoterine® og Hexafluorine®)

For at kunne handle i nødstilfælde er det vigtigt at vide, hvordan vores førstehjælpsprodukter fungerer og bruges.

Instruktionerne nedenfor beskriver den nemmeste måde at åbne Flaske 500ml (gælder både Diphoterine og Hexafluorine).

### Åbnes ved at dreje med eller mod uret.

Proppen åbnes ved at dreje den enten med eller mod uret. Så går 2 små plastiksikringer i stykker, der hjælper med at holde låget på plads, samtidig med at det viser, at flasken er uåbnet. Se billede 1 nedenfor.

### Bemærk, at flaskehalsen udgør en del af "proppen"

Det er vigtigt at bemærke, at flaskehalsen går op med en ring, der forbinder til selve flaskens låg. For at åbne låget skal du passe på kun at tage fat i den del, der udgør selve "låget" Se billede 2 nedenfor.

Det er vigtigt ikke at tage for meget fat omkring hele toppen af flasken. Hvis dette er tilfældet, er effekten, at du også forsøger at vende den faste flaskehals, og der sker ikke noget. Se billede 3 nedenfor.



Foto 1 plastsikring, der går i stykker, når de åbnes.



Foto 2 korrekt teknik ved åbning.



Foto 3 Forkert teknik ved åbning.